

Hygiène et désinfection pour les cabinets de podologie



SALLE D'EXAMEN

SANTÉ
exeol

Partout où l'**HYGIÈNE** est un enjeu de **SANTÉ PUBLIQUE**

Protocoles d'utilisation des produits



exeol surf optimal

Détergent désinfectant sans alcool
pour surfaces et dispositifs médicaux.
Prêt à l'emploi



exeol wipes optimal

Lingettes détergentes désinfectantes
de surfaces et dispositifs médicaux,
sans alcool.
Prêt à l'emploi

SURFACES



exeol care

Crème mains
hydratante



exeol gel 82

Gel hydroalcoolique



exeol skin

Lotion lavante mains
et corps **Écolabel**

HYGIÈNE DES MAINS



GAMME COMPLÉMENTAIRE



LVSM600

Liquide Vitres et Surfaces
Modernes Écolabel.
Prêt à l'emploi



PA

Parfum d'ambiance

SOLS ET SURFACES



exeol floor

Détergent désinfectant
sols et surfaces.
À diluer



DN600

Détergent Neutre Écolabel
Senteur Fraîcheur Boisée.
À diluer

Hygiène et désinfection pour les cabinets de podologie

SALLE DE STÉRILISATION / ATELIER



Protocoles d'utilisation des produits



exeol surf optimal

Détergent désinfectant sans alcool pour surfaces et dispositifs médicaux. Prêt à l'emploi



exeol wipes optimal

Lingettes détergentes désinfectantes de surfaces et dispositifs médicaux, sans alcool. Prêt à l'emploi



exeol gel 82

Gel hydroalcoolique



exeol skin

Lotion lavante mains et corps Écolabel

SURFACES

HYGIÈNE DES MAINS

SALLE DE STÉRILISATION

ATELIER

DÉTERGENTS ET DÉSINFECTANTS
Instruments et Dispositifs médicaux

DÉSINFECTANT DE HAUT NIVEAU

SOLS



exeol D drill

Détergent désinfectant des instruments rotatifs. Prêt à l'emploi



exeol sept first

Détergent désinfectant pH neutre. À diluer



exeol renov

Rénovateur des instruments en acier inoxydable. À diluer



exeol sept E2

Détergent désinfectant enzymatique pH neutre. À diluer



exeol floor

Détergent désinfectant sols et surfaces. À diluer



exeol GTA 2%

Désinfectant de haut niveau. Prêt à l'emploi



exeol PA

Désinfectant de haut niveau. Prêt à l'emploi

Liste des produits de la gamme cabinets de podologie

HYGIÈNE ET SOIN DES MAINS



- EXS0011 : 100 mL pocket
- EXS0012 : 300 mL pompe
- EXS0013 : 500 mL pompe
- EXS0014 : 1L pompe
- EXS0015 : 1L airless
- EXS0016 : bidon 5L

exeol gel 82

Gel hydroalcoolique

Traitement hygiénique et désinfection chirurgicale des mains par friction.

Prêt à l'emploi
Biocide TP1



- EXS0009 : 500 mL pompe
- EXS0008 : 1L pompe
- EXS0119 : 1L airless

exeol scrub 4%

Solution lavante mains antiseptique

Lavage hygiénique et chirurgical des mains.

Prêt à l'emploi
Biocide TP1



- EXS0079 : 250 mL pompe
- EXS0001 : 500 mL pompe
- EXS0002 : 1L pompe
- EXS0007 : 1L airless
- EXS0003 : bidon 5L

exeol skin

Lotion lavante mains et corps Écolabel

Pour le lavage simple des mains et du corps en milieu de santé. Adapté pour un usage fréquent sur les mains.

Prêt à l'emploi
Cosmétique



- EXS0072 : 50mL tube
- EXS0073 : 100mL tube
- EXS0074 : 500 mL pompe
- EXS0083 : 1L airless

exeol care

Crème mains hydratante

Crème hydratante à base de glycérine et d'huile de macadamia pour le soin quotidien des mains.

Prêt à l'emploi
Cosmétique

SURFACES



- EXS0038 : 750mL spray

exeol surf optimal


Détergent désinfectant sans alcool pour surfaces et dispositifs médicaux, sans alcool

Solution prête à l'emploi :

- Application dispositif médical : pour le nettoyage et la désinfection par essuyage des surfaces des dispositifs médicaux réutilisables invasifs et non-invasifs.
- Application produit biocide : pour le nettoyage et la désinfection par essuyage des surfaces, du mobilier et des équipements lourds.

sans alcool

Prêt à l'emploi
Biocide TP2-TP4
DM classe IIa

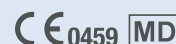

- EXS0041 : 100 lingettes

exeol wipes optimal


Lingettes détergentes désinfectantes de surfaces et dispositifs médicaux, sans alcool

Lingettes pré-impregnées :

- Application dispositif médical : pour le nettoyage et la désinfection par essuyage humide des surfaces des dispositifs médicaux réutilisables invasifs et non-invasifs.
- Application produit biocide : pour le nettoyage et la désinfection par essuyage humide des surfaces, du mobilier et des équipements lourds.

sans alcool

Prêt à l'emploi
Biocide TP2-TP4
DM classe IIa

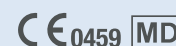

SOLS ET SURFACES



- EXS0055 : dose 20mL
- EXS0053 : 1L doseur
- EXS0054 : bidon 5L

exeol floor

Détergent désinfectant sols et surfaces

Pour le nettoyage et la désinfection des sols, surfaces et murs. Usage sur tous les types de sols et surfaces par essuyage humide.

À diluer
Biocide TP2/TP4
Parfum* citron



- EXE0421 : dose 20mL
- EXE0284 : 1L doseur rechargeable
- EXE0296 : bidon 5L

DN600

Détergent Neutre Ecolabel

Pour l'entretien quotidien des sols protégés ou non et des surfaces.

À diluer
Parfum* Fraîcheur
boisée

INSTRUMENTS ET DISPOSITIFS MÉDICAUX IMMERGEABLES

	• EXD0003 : bidon 2L • EXD0002 : bidon 5L	exeol D drill Détergent désinfectant des instruments rotatifs Solution prête à l'emploi pour le nettoyage et la désinfection par immersion des instruments rotatifs réutilisables invasifs et non invasifs, avant stérilisation.	Prêt à l'emploi DM classe IIa CE 0459 MD
	• EXS0048 : dose 20mL • EXS0046 : 1L doseur • EXS0087 : bidon 5L	exeol sept E2 Détergent désinfectant enzymatique pH neutre Solution enzymatique à diluer pour le nettoyage et la désinfection par immersion des dispositifs médicaux réutilisables invasifs et non-invasifs, avant stérilisation ou désinfection finale.	À diluer 0,4% DM classe IIa CE 0459 MD
	• EXS0045 : dose 20mL • EXS0043 : 1L doseur • EXS0088 : bidon 5L	exeol sept first Détergent désinfectant pH neutre Solution à diluer pour le nettoyage et la désinfection par immersion des dispositifs médicaux réutilisables invasifs et non-invasifs, avant stérilisation ou désinfection finale.	À diluer 0,4% DM classe IIa CE 0459 MD
	• EXS0117 : 1L doseur • EXS0131 : bidon 5L	exeol renov Rénovateur des instruments en acier inoxydable	À diluer 1 à 4%
	• EXS0092 : bidon 5L • AC0174 : bandelettes exeol strips GTA 2%	exeol GTA 2% Désinfectant de haut niveau Solution prête à l'emploi à base de glutaraldéhyde pour la désinfection finale par immersion des dispositifs médicaux thermosensibles semi-critiques et critiques réutilisables invasifs et non-invasifs préalablement nettoyés.	Prêt à l'emploi DM classe IIb CE 0459 MD
	• EXS0063 : bidon 5L • AC0194 : bandelettes exeol strips PA	exeol PA Désinfectant de haut niveau Pour la désinfection par immersion des dispositifs médicaux. À base d'acide peracétique.	Prêt à l'emploi DM classe IIb CE 0297 MD

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

	• EXP0058 : 750mL spray • EXP0059 : bidon 5L	exeol flash Détachant toutes surfaces Pour l'élimination des taches sur les surfaces dures et textiles lavables à l'eau.	Prêt à l'emploi
	• EXS0057 : 750mL spray • EXS0058 : bidon 5L	exeol san Détergent détartrant désinfectant sanitaires Pour le nettoyage, le détartrage et la désinfection des sanitaires.	Prêt à l'emploi Biocide TP2 Parfum* frais
	• POD0216 : 250mL spray (Ambiance) • POD0221 : 250mL spray (Citron vert) • POD0226 : 250mL spray (Floral) • POD0281 : 250mL spray (Hegoa)	PA - Parfum d'Ambiance Puissant désodorisant d'atmosphère Élimine efficacement et rapidement les odeurs indésirables.	Prêt à l'emploi
	• EXE0234 : 750mL spray • EXE0235 : bidon 5L	LVSM 600 Liquide Vitres et Surfaces Modernes Écolabel Nettoyant dégraissant pour les vitres et surfaces modernes (plexiglass, meubles vernis, laqués, stratifiés, formica, polyester, écrans multimédia).	Prêt à l'emploi

Uniquement à usage professionnel. Fiches de données de sécurité (FDS) et fiches techniques disponibles sur www.exeol.fr. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. *Parfum de synthèse. Sans substance CMR classée selon la réglementation européenne en vigueur (en date de mars 2023) et cahier des charges strict des parfums exeol.