

Hygiène et désinfection pour les cabinets dentaires

SALLE D'EXAMEN



SANTÉ
exeol

Partout où l'**HYGIÈNE** est un enjeu de **SANTÉ PUBLIQUE**

Protocoles d'utilisation des produits

exeol surf optimal

Détergent désinfectant sans alcool
pour surfaces et dispositifs médicaux.
Prêt à l'emploi

exeol wipes optimal

Lingettes détergentes désinfectantes
de surfaces et dispositifs médicaux,
sans alcool.
Prêt à l'emploi

SURFACES

exeol care
Crème mains
hydratante

exeol gel 82

Gel hydroalcoolique

exeol skin

Lotion lavante mains
et corps **Écolabel**

HYGIÈNE DES MAINS

ASPIRATION DENTAIRE

exeol D aspi

Détergent désinfectant
des systèmes d'aspiration dentaire.
À diluer

SOLS ET SURFACES

exeol floor

Détergent désinfectant
sols et surfaces.
À diluer

AMBIANCE

PA

Parfum d'ambiance

Hygiène et désinfection pour les cabinets dentaires

SALLE DE STÉRILISATION



Protocoles d'utilisation des produits



exeol surf optimal

Détergent désinfectant sans alcool
pour surfaces et dispositifs médicaux.
Prêt à l'emploi



exeol wipes optimal

Lingettes détergentes désinfectantes
de surfaces et dispositifs médicaux,
sans alcool.
Prêt à l'emploi



exeol gel 82

Gel hydroalcoolique



exeol skin

Lotion lavante mains
et corps Écolabel

SURFACES

HYGIÈNE DES MAINS



exeol D print

Désinfectant des empreintes
dentaires par pulvérisation.
Prêt à l'emploi

EMPREINTES DENTAIRES

INSTRUMENTS ET DISPOSITIFS MÉDICAUX IMMERGEABLES



exeol D drill

Détergent désinfectant
des instruments rotatifs.
Prêt à l'emploi



exeol renov

Rénovateur des
instruments en
acier inoxydable.
À diluer



exeol sept first

Détergent désinfectant
pH neutre.
À diluer



exeol sept E2

Détergent désinfectant
enzymatique pH neutre.
À diluer

SOLS



exeol floor

Détergent désinfectant
sols et surfaces.
À diluer

Liste des produits de la gamme cabinets dentaires

HYGIÈNE ET SOIN DES MAINS

	• EXS0011 : 100 mL pocket • EXS0012 : 300 mL pompe • EXS0013 : 500 mL pompe • EXS0014 : 1L pompe • EXS0015 : 1L airless • EXS0016 : bidon 5L	exeol gel 82 Gel hydroalcoolique Traitement hygiénique et désinfection chirurgicale des mains par friction.	Prêt à l'emploi Biocide TP1
	• EXS0009 : 500 mL pompe • EXS0008 : 1L pompe • EXS0119 : 1L airless	exeol scrub 4% Solution lavante mains antiseptique Lavage hygiénique et chirurgical des mains.	Prêt à l'emploi Biocide TP1
	• EXS0079 : 250 mL pompe • EXS0001 : 500 mL pompe • EXS0002 : 1L pompe • EXS0007 : 1L airless • EXS0003 : bidon 5L	exeol skin Lotion lavante mains et corps Écolabel Pour le lavage simple des mains et du corps en milieu de santé. Adapté pour un usage fréquent sur les mains.	Prêt à l'emploi Cosmétique
	• EXS0072 : 50mL tube • EXS0073 : 100mL tube • EXS0074 : 500 mL pompe • EXS0083 : 1L airless	exeol care Crème mains hydratante Crème hydratante à base de glycérine et d'huile de macadamia pour le soin quotidien des mains.	Prêt à l'emploi Cosmétique

SURFACES

	• EXS0038 : 750mL spray	exeol surf optimal Détergent désinfectant sans alcool pour surfaces et dispositifs médicaux Solution prête à l'emploi : • <u>Application dispositif médical</u> : pour le nettoyage et la désinfection par essuyage des surfaces des dispositifs médicaux réutilisables invasifs et non-invasifs. • <u>Application produit biocide</u> : pour le nettoyage et la désinfection par essuyage des surfaces, du mobilier et des équipements lourds. sans alcool	Prêt à l'emploi Biocide TP2-TP4 DM classe IIa CE 0459 MD
	• EXS0041 : 100 lingettes	exeol wipes optimal Lingettes détergentes désinfectantes de surfaces et dispositifs médicaux Lingettes pré-impregnées : • <u>Application dispositif médical</u> : pour le nettoyage et la désinfection par essuyage humide des surfaces des dispositifs médicaux réutilisables invasifs et non-invasifs. • <u>Application produit biocide</u> : pour le nettoyage et la désinfection par essuyage humide des surfaces, du mobilier et des équipements lourds. sans alcool	Prêt à l'emploi Biocide TP2-TP4 DM classe IIa CE 0459 MD

SOLS ET SURFACES

	• EXS0055 : dose 20mL • EXS0053 : 1L doseur • EXS0054 : bidon 5L	exeol floor Détergent désinfectant sols et surfaces Pour le nettoyage et la désinfection des sols, surfaces et murs. Usage sur tous les types de sols et surfaces par essuyage humide.	À diluer Biocide TP2/TP4 Parfum* citron
--	--	---	--

INSTRUMENTS ET DISPOSITIFS MÉDICAUX IMMERGEABLES

	• EXD0003 : bidon 2L • EXD0002 : bidon 5L	exeol D drill Détergent désinfectant des instruments rotatifs Solution prête à l'emploi pour le nettoyage et la désinfection par immersion des instruments rotatifs réutilisables invasifs et non invasifs, avant stérilisation.	Prêt à l'emploi DM classe IIa CE 0459 MD
	• EXS0048 : dose 20mL • EXS0046 : 1L doseur • EXS0087 : bidon 5L	exeol sept E2 Détergent désinfectant enzymatique pH neutre Solution enzymatique à diluer pour le nettoyage et la désinfection par immersion des dispositifs médicaux réutilisables invasifs et non-invasifs, avant stérilisation ou désinfection finale.	À diluer 0,4% DM classe IIa CE 0459 MD
	• EXS0045 : dose 20mL • EXS0043 : 1L doseur • EXS0088 : bidon 5L	exeol sept first Détergent désinfectant pH neutre Solution à diluer pour le nettoyage et la désinfection par immersion des dispositifs médicaux réutilisables invasifs et non-invasifs, avant stérilisation ou désinfection finale.	À diluer 0,4% DM classe IIa CE 0459 MD
	• EXS0117 : 1L doseur • EXS0131 : bidon 5L	exeol renov Rénovateur des instruments en acier inoxydable	À diluer 1 à 4%

EMPREINTES DENTAIRES

	• EXD0001 : 1L spray	exeol D print Désinfectant des empreintes dentaires par pulvérisation Solution prête à l'emploi pour la désinfection des empreintes dentaires.	Prêt à l'emploi DM classe IIa CE 0459 MD
--	--	--	--

ASPIRATION DENTAIRE

	• EXD0005 : 1L doseur • EXD0004 : bidon 5L	exeol D asi Détergent désinfectant des systèmes d'aspiration dentaire Solution à diluer pour le nettoyage et la désinfection des systèmes d'aspiration connectés à l'unit dentaire.	À diluer 2% DM classe IIa CE 0459 MD
--	---	---	--

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

	• EXP0058 : 750mL spray • EXP0059 : bidon 5L	exeol flash Détachant toutes surfaces Pour l'élimination des taches sur les surfaces dures et textiles lavables à l'eau.	Prêt à l'emploi
	• EXS0057 : 750mL spray • EXS0058 : bidon 5L	exeol san Détergent détartrant désinfectant sanitaires Pour le nettoyage, le détartrage et la désinfection des sanitaires.	Prêt à l'emploi Biocide TP2 Parfum* frais
	• POD0216 : 250mL spray (Ambiance) • POD0221 : 250mL spray (Citron vert) • POD0226 : 250mL spray (Floral) • POD0281 : 250mL spray (Hegoa)	PA - Parfum d'Ambiance Puissant désodorisant d'atmosphère Élimine efficacement et rapidement les odeurs indésirables.	Prêt à l'emploi

Uniquement à usage professionnel. Fiches de données de sécurité (FDS) et fiches techniques disponibles sur www.exeol.fr. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. *Parfum de synthèse. Sans substance CMR classée selon la réglementation européenne en vigueur (en date de mars 2023) et cahier des charges strict des parfums exeol.